

**TRIXIE**

 **pezz**



*Mit Gesundheitsvorsorge das Wohlbefinden steigern:*

**Urin- und Wurmtests für zu Hause**

## Urintests für Hunde

- Gesundheitswerte (**Hämoglobin, Glukose, ph-Wert, Ketone, Protein, Leukozyten, spezifisches Gewicht**) zu Hause testen
- Anzeichen von Nieren-, Harnwegserkrankungen und Diabetes frühzeitig erkennen
- je nach Erkrankung Heilungschancen verbessern, schwere Krankheitsverläufe vermeiden bzw. Lebenserwartung erhöhen



### Verpackungsinhalt:

Pezz-Testschale mit integriertem ISO 13485 zertifiziertem Teststreifen | Haltestange aus umweltschonendem Karton

### Zum Film:



## So geht's:

Kostenlose Pezz-App installieren, Profil erstellen und sich Schritt für Schritt durch den Test führen lassen.



### 1. Sammeln

Urin mit der Testschale einfangen



### 2. Scannen

Teststreifen auf der Unterseite der Testschale einscannen



### 3. Ergebnis

KI-gestützte, von Fachpersonal geprüfte Analyse sowie Handlungsempfehlungen innerhalb kürzester Zeit in der App erhalten



## Urintests für Katzen

- Gesundheitswerte (**Hämoglobin, Glukose, ph-Wert, Ketone, Protein**) zu Hause testen
- Anzeichen von Nieren-, Harnwegserkrankungen und Diabetes frühzeitig erkennen
- je nach Erkrankung Heilungschancen verbessern, schwere Krankheitsverläufe vermeiden bzw. Lebenserwartung erhöhen



### Zum Film:



### Verpackungsinhalt:

ausreichende Menge an nicht-saugendem Spezialsand, auch für große Katzenthoiletten | Pezz-Testschale mit integriertem ISO 13485 zertifiziertem Teststreifen | Griff aus umweltschonendem Karton | Spritze zum Aufziehen des Urins mit Verschlusskappe

## So geht's:

Kostenlose Pezz-App installieren, Profil erstellen und sich Schritt für Schritt durch den Test führen lassen.



### 1. Sammeln

Katzenloilette mit Spezialsand füllen und Urin mithilfe der Einwegspritze sammeln



### 2. Scannen

Urin in Testschale geben und Teststreifen auf der Unterseite einscannen



### 3. Ergebnis

KI-gestützte, von Fachpersonal geprüfte Analyse sowie Handlungsempfehlungen innerhalb kürzester Zeit in der App erhalten



# Wurmtests für Hunde und Katzen

- Labortest für die häufigsten **Wurmarten** (Spulwürmer, Peitschenwürmer, Hakenwürmer), **Kokzidien** und **Giardien**
- Wurmbefall frühzeitig erkennen
- unnötige Wurmkuren vermeiden
- zur Erfolgskontrolle einer Giardien-Behandlung



**Verpackungsinhalt:**  
je drei Probenbehälter und Entnahmestäbchen | Verpackungsmaterial für den Rückversand



## So geht's:

Kostenlose Pezz-App installieren oder Test auf [www.pezz.life/start](http://www.pezz.life/start) aktivieren und kostenloses Rücksende-Etikett erhalten.



- 1. Sammeln**  
An drei Tagen Kotproben sammeln



- 2. Versenden**  
Proben ohne Zusatzkosten an das Pezz-Labor senden (Verpackungsmaterial enthalten)



- 3. Ergebnis**  
Ausführlicher Laborbefund (z. B. für den Tierarzt) innerhalb von 2 bis 4 Tagen per E-Mail. Gezielt entwurmen, wenn es nötig ist.



## Labordiagnostik bei Pezz

Das Pezz-Team besteht aus Tierärzt\*innen, Wissenschaftler\*innen und Laborfachkräften.

Um Infektionen mit Haken-, Spul-, Peitschenwürmern, Kokzidien sowie Giardien zu identifizieren, werden im Labor Kotproben systematisch mithilfe modernster Diagnostik-Methoden aufbereitet und von unseren Expert\*innen ausgewertet.

#972152



TRIXIE Heimtierbedarf  
Industriestr. 32  
24963 Tarp · GERMANY  
[www.trixie.de](http://www.trixie.de)

