

TRIXIE

 **pezz**



Met preventie op gezondheidsgebied het welzijn verhogen:

Urine- und wormtests voor thuis

Urintest voor honden

- Gezondheidswaarden (**hemoglobine, glucose, pH-waarde, ketonen, eiwitten, leukocyten, soortelijk gewicht**) thuis testen
- Symptomen van nier-, urinewegaandoeningen en diabetes vroegtijdig opsporen
- Afhankelijk van de ziekte de kans op genezing verbeteren, ernstig verloop van de ziekte voorkomen resp. de levensverwachting verhogen



Inhoud verpakking:


Pezz-testbakje met geïntegreerde ISO 13485-gecertificeerde teststrip | Handvat van milieuvriendelijk karton

Naar de film:



Zo werkt het:

Kostenloze Pezz-app installeren, profiel aanmaken en je stap voor stap door de test laten leiden.

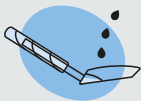

1. Verzamelen:
Urine met het testbakje opvangen.



2. Scannen:
Teststrip aan de onderkant van het testbakje inscannen.



3. Resultaat:
AI-ondersteunde, door vakkundig personeel gecontroleerde analyse alsmede aanbevelingen voor de behandeling binnen korte tijd in de app ontvangen.



Urintest voor katten

- Gezondheidswaarden (**hemoglobine, glucose, pH-waarde, ketonen, eiwit**) thuis testen
- Voortekenen van nier- en urinewegaandoeningen en diabetes vroegtijdig opsporen
- Afhankelijk van de ziekte de kans op genezing verbeteren, ernstig verloop van de ziekte voorkomen respectievelijk de levensverwachting verhogen

Naar de film:



Inhoud verpakking:

Voldoende hoeveelheid niet absorberend speciaal zand, ook voor grote kattenbakken | Pezz-testbakje met geïntegreerde ISO 13485 gecertificeerde teststrip | Handvat van milieuvriendelijk karton | Spuit met afsluitdop voor het opzuigen van de urine



Zo werkt het:

Kostenloze Pezz-app installeren, profiel aanmaken en je stap voor stap door de test laten leiden.



1. Verzamelen:

Kattenbak met speciaal zand vullen en urine met behulp van de wegwerpspuit opvangen.



2. Scannen:

Urine in het testbakje doen en teststrip aan de onderkant inscannen.



3. Resultaat:

AI-ondersteunde, door vakkundig personeel gecontroleerde analyse alsmede aanbevelingen voor de behandeling binnen korte tijd in de app ontvangen.



Wormtest voor honden en katten

- Laboratoriumonderzoek voor de meest voorkomende **wormsoorten** (spoelwormen, zweepwormen, haakwormen), **Coccidia** en **Giardia**
- Besmetting met wormen vroegtijdig ontdekken
- Onnodig ontwormen vermijden
- Om het succes van een giardia-behandeling te controleren



Inhoud verpakking:

Drie monsterpotjes en monsteropname-staafjes | Verpakkingsmateriaal voor de retourzending



Naar de film:



Zo werkt het:

Kostenloze Pezz-app installeren of de test op www.pezz.life/start activeren en een kosteloos retouretiket verkrijgen.



1. Verzamelen:

Op drie dagen ontlastingsmonsters opvangen.



2. Verzenden:

Monsters zonder extra kosten naar het Pezz-lab zenden (verpakkingsmateriaal inbegrepen).



3. Resultaat:

Gedetailleerde laboratoriumresultaten (bijv. voor de dierenarts) binnen 2 tot 4 dagen per e-mail. Doelgericht ontwormen indien noodzakelijk.



Laboratoriumdiagnostiek bij Pezz

Het Pezz-team bestaat uit dierenartsen, wetenschappers en laboranten.

Om infecties met haak-, spoel- en zweepwormen, alsmede Coccidia en Giardia te identificeren, worden ontlastingsmonsters in het laboratorium systematisch met behulp van de modernste diagnostische methoden verwerkt en door onze experts beoordeeld.

#972155



TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32
24963 Tarp · GERMANY
www.trixie.de

